

ZAHLEN & FAKTEN

Technische Angaben zum Alginat-Mixer

Spannung	AC 220 – 230 V, 50/60 Hz
Leistung	220 W
Drehzahl	3.400 rpm
Zeitschaltung	Pro Sekunde einstellbar: 1 – 16 sek.
Speicher- plätze	Drei vorprogrammierte Einstellungen: 8, 10 und 12 sek. Auch selbst programmierbar.
Abmessungen	b x l x h = 205 x 250 x 285 mm
Gewicht	16 kg


Eigenschaften

- voll automatisiert
- zuverlässig
- sauber
- immer eine homogene Paste, ohne Luftblasen
- schnell

Vom Pulver zur Paste in nur 10 Sekunden
Dem Cavex Alginate Mixer liegt eine ausführliche Gebrauchsanweisung bei. Die Bedienung ist so einfach, dass der Gebrauch mithilfe weniger Abbildungen anschaulich erklärt werden kann.



1
Dosieren Sie die Wasser- und Pulvermenge nach Vorschrift

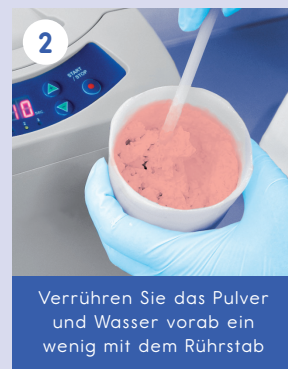

2
Verrühren Sie das Pulver und Wasser vorab ein wenig mit dem Rührstab



3
Verschließen Sie den Mischbecher richtig



4
Stellen Sie den gefüllten und verschlossenen Mischbecher in den Mixer



5
Ist der Deckel gut verschlossen? Drücken Sie dann auf den Start-Knopf



6
Mit dem Spatel nach Maß nehmen Sie die Alginatepaste aus dem Becher

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Im Spiet 101 | 26506 Norden | Deutschland | cavex-deutschland.de

CAVEX

ZY130D.03

PREMIUM DENTAL PRODUCTS

CAVEX ALGINATE MIXER II

-
Das beste, was einem
Alginat passieren kan,
der Cavex Alginate
Mixer II



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

EIN KNOPFDRUCK STATT AUFWÄNDIGER HANDARBEIT



Der Cavex Alginate-Mischer – gemacht für Cavex Alginate

Cavex Alginate ist für seine hohe Qualität und Detailwiedergabe bekannt. Diese Qualität verdient eine gleichbleibend hohe Verarbeitung. Der Cavex Alginate-Mischer wurde speziell entwickelt, um Alginate gleichmäßig, schnell und vollständig homogen zu mischen. So erhält der Behandelnde stets ein optimal gemischtes Alginate für einen perfekten Abdruck.

Der sichere Weg

Manuelles Mischen führt zu Abweichungen in Zusammensetzung, Konsistenz und Abbindezeit. Der Cavex Alginate-Mischer nimmt diese Abweichungen aus Ihrem Arbeitsprozess. Jede Charge wird exakt nach den gleichen Parametern gemischt, mit vorhersehbaren Ergebnissen. Das bedeutet: perfekte Abdrücke, jedes Mal.

Vom Kompromiss zur perfekten Alginatmasse

Handmischen ist immer ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Qualität. Klumpen oder Luftblasen lassen sich kaum vermeiden. Der Cavex Alginate-Mischer liefert eine glatte, blasenfreie und vollständig homogene Paste – ohne Kompromisse.

Von Minuten zu Sekunden

Manuelles Mischen braucht Zeit. Der Cavex Alginate-Mischer verkürzt diesen Vorgang auf

nur 8 bis 12 Sekunden pro Mischvorgang. Das Ergebnis: sofortige Zeitersparnis und geringere körperliche Belastung für die Assistenz.

So eine schöne, homogene Paste haben Sie noch nie gesehen.

Die kraftvolle, mehrachsige Rotation des Cavex Alginate-Mischers sorgt für eine einzigartig glatte Paste, frei von Lufteinschlüssen und unvermishtem Material. Ideal für Standard- und steife Alginate. Ergebnis: optimale Abdruckqualität bei minimalem Kraftaufwand.

Von rauer zu glatter Oberfläche

Schluss mit Mischbechern, Spateln und Kleckern. Der Cavex Alginate-Mischer ist kompakt (nur 20 x 25 cm), stabil und hat ein schlankes, modernes Design, das in jede Praxis passt.

Ein Lob vom Labor

Ein besser gemischtes Alginate führt zu besseren Abdrücken – und das ist wichtig für das Dentallabor.

Keine Gipsperlen mehr, schärfere Details, höhere Reproduzierbarkeit. Die Qualität Ihrer Arbeit wird sichtbar gesteigert.





EIN PERFEKTER ABDRUCK BRAUCHT KEIN ZUFALL ZU SEIN

Produktübersicht

AT520	Cavex Alginate Mixer II, inkl. 10 x 500 g Cavex Cream NS
AT521	Cavex Alginate Mixer II, inkl. 10 x 500 g Cavex CA37 NS
AT522	Cavex Alginate Mixer II, inkl. 10 x 500 g Cavex Impressional NS
AT523	Cavex Alginate Mixer II, inkl. 10 x 500 g Cavex ColorChange
AT524	Cavex Alginate Mixer II, inkl. 10 x 500 g Cavex Orthotrace



Welches Alginat?

Cavex empfiehlt, Normal Set Alginat im Cavex Alginat-Mixer zu verwenden. Das Gerät mischt besonders intensiv, sodass die Reaktionsgeschwindigkeit der Inhaltsstoffe höher ist. Bei der Verwendung von Fast Set Alginaten kann es je nach Situation zu einer zu kurzen Verarbeitungszeit kommen. In diesem Fall kann eine kürzere Mischzeit und/oder die Verwendung von kaltem Wasser helfen, die Verarbeitungszeit zu verlängern.

Zubehör

AT240	Cavex Alginat Behälter: mit Meßlöffel, zur Konditionierung des Pulvers, leicht zu öffnen und zu verschließen
AT530	Mischbecher für den Cavex Alginate Mixer II
AT511	Kunststoffspatel für den Cavex Alginate Mixer
AT513	Kunststoffrührstab für den Cavex Alginate Mixer
AT040	Cavex Alginatvorratsbehälter, luft- und feuchtigkeitsgeschützt
AT076	Cavex Pulverlöffel mit praktischem langem Stiel. Cavex Wasserbecher mit 4 Maßstrichen, für die Orthodontie geeignet.
AT021	Cavex Wasserdosierflasche zur präzisen Dosierung. Garantiert gleichbleibende Temperatur des Wassers
HA001	Cavex GreenClean, pH-neutral zur Reinigung von Abdrucklöffeln, Spateln und Instrumenten

AT530

AT511

AT513

AT040

AT021

AT240

AT076

HA001

Modelländerungen vorbehalten

Cavex-Alginat und -Zubehör können Sie durch Ihr Dentaldepot beziehen. Weitere Informationen über die Zusammensetzung der Produkte und deren Anwendungen erhalten Sie bei Cavex, unter der Nummer +49 (0)4931 9809682 oder www.cavex-deutschland.de